

INSTRUCCIONES



SEGURIDAD ANTE TODO:



CONTROLAR
LOS ALREDEDORES




CONTROLAR
SITUACION / VICTIMA



LLAMAR A
EMERGENCIAS



PON TU TELÉFONO
EN ALTAVOZ

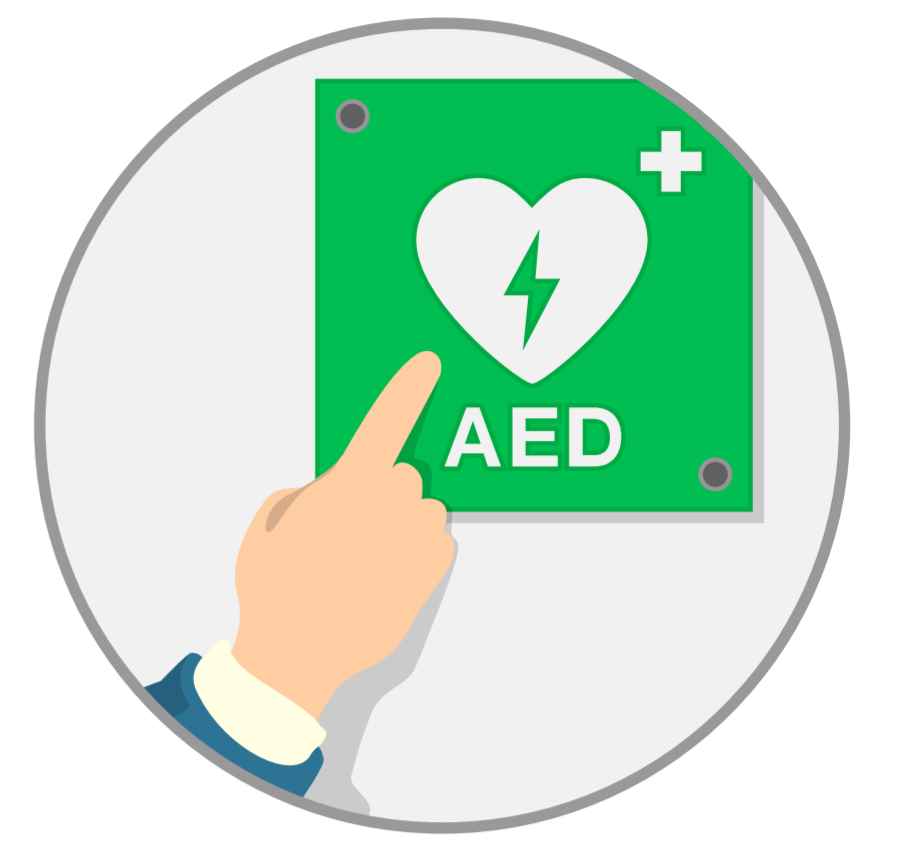

LLAMAR
POR AYUDA / DESA

HEMORRAGIA SEVERA:



APLICAR PRESIÓN
CON LA MANO
SIGUIR PRESIONANDO




APLICAR
VENDAJE

¿SIGUE SANGRANDO?



¿PARO DE SANGRAR?

BRAZO O PIERNA:

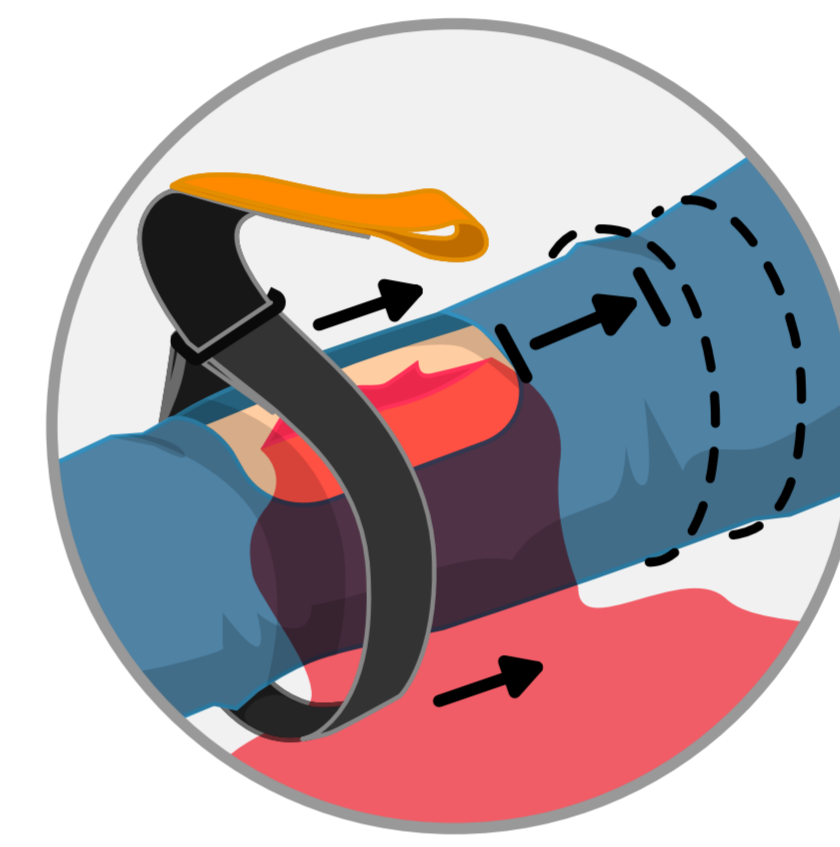

POSICIONAR
TORNIQUETE



APRETAR!
ENROLLAR TORNIQUETE

VÍAS RESPIRATORIAS /RESPIRACIÓN:



EXAMINAR
OBSTRUCCIONES




VERIFICAR
LA RESPIRACIÓN

¿SIN RESPIRACIÓN?




¿HAY RESPIRACIÓN?

CIRCULACIÓN:

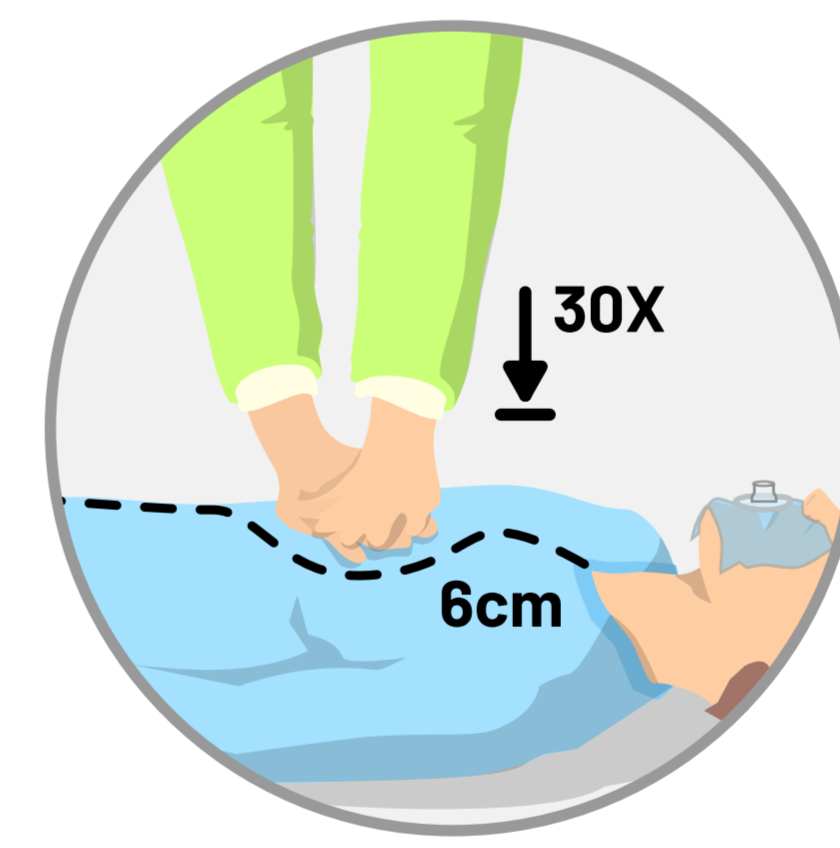

REALIZAR 30
COMPRESIONES DE PECHO

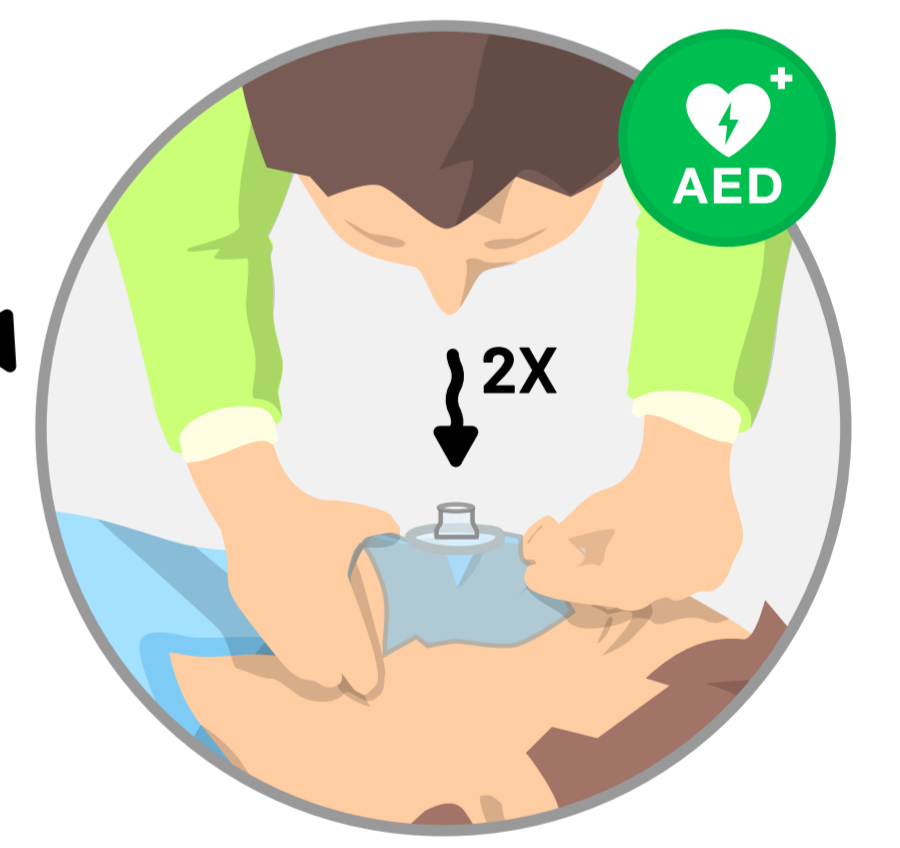

REALIZAR 2
RESPIRACIONES MEDIAS

ASISTENCIA POSTOPERATORIA:



ESTABILIZAR
VÍCTIMA



ENVOLVER EN
MANTA TÉRMICA



REVISAR
SANGRADO
**AJUSTAR TORNIQUETE
SI ES NECESARIO**



EXAMINAR
RESPIRACIÓN



LLEGA LA AYUDA
SEGUIR INSTRUCCIONES