

ИНСТРУКЦИИ



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО



УБЕДИТЕСЬ В
БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА




ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ
ПОСТРАДАВШЕГО



ПОЗВОНИТЕ 103
ПОПРОСИТЕ О ПОМОЩИ



ВКЛЮЧИТЕ ГРОМКУЮ
СВЯЗЬ

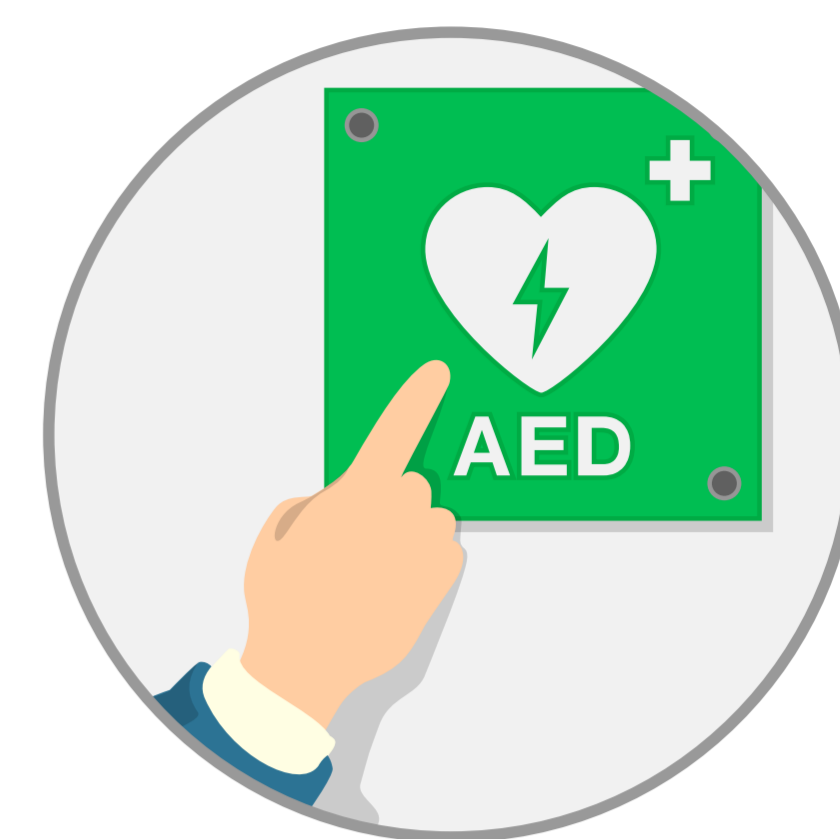

ПОПРОСИТЕ О
ПОМОЩИ / АНД

СИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



СИЛЬНО НАДАВИТЕ
НА РАНУ

ПРОДОЛЖАЙТЕ УДЕРЖИВАТЬ




НАЛОЖИТЕ
ПОВЯЗКУ

КРОВОТЕЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ?



ПРЕКРАТИЛОСЬ?

РУКА ИЛИ НОГА

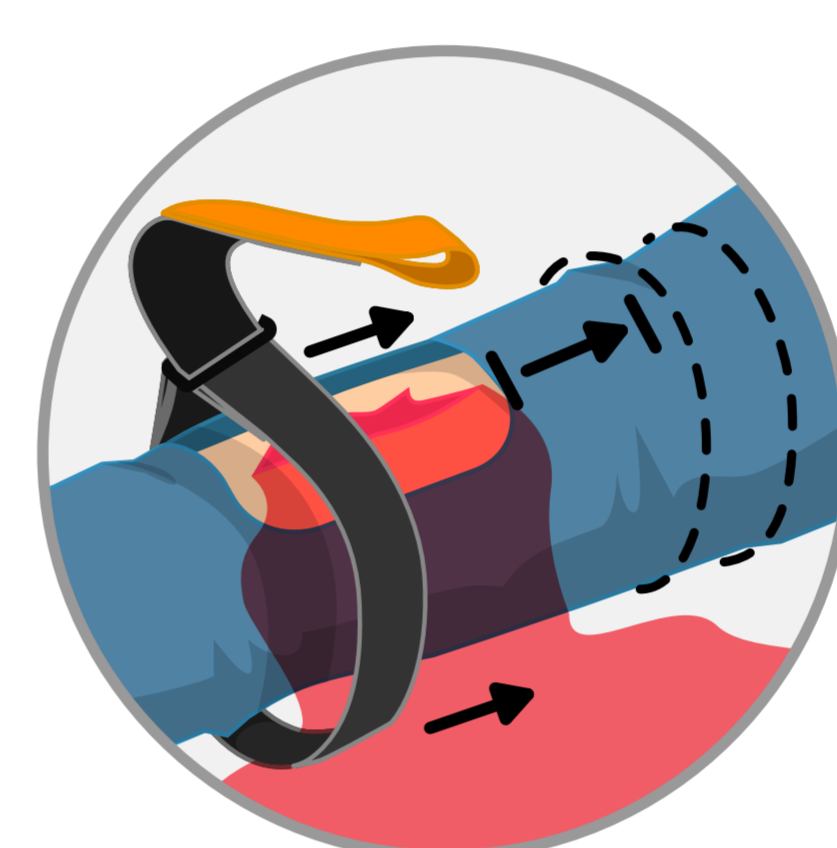

НАЛОЖИТЕ
ЖГУТ



НАТЯНИТЕ И
ОБМОТАЙТЕ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ



ПРОВЕРЬТЕ НА
НАЛИЧИЕ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ




ПРОВЕРЬТЕ
ДЫХАНИЕ

ДЫХАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ?




ДЫХАНИЕ ЕСТЬ?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ

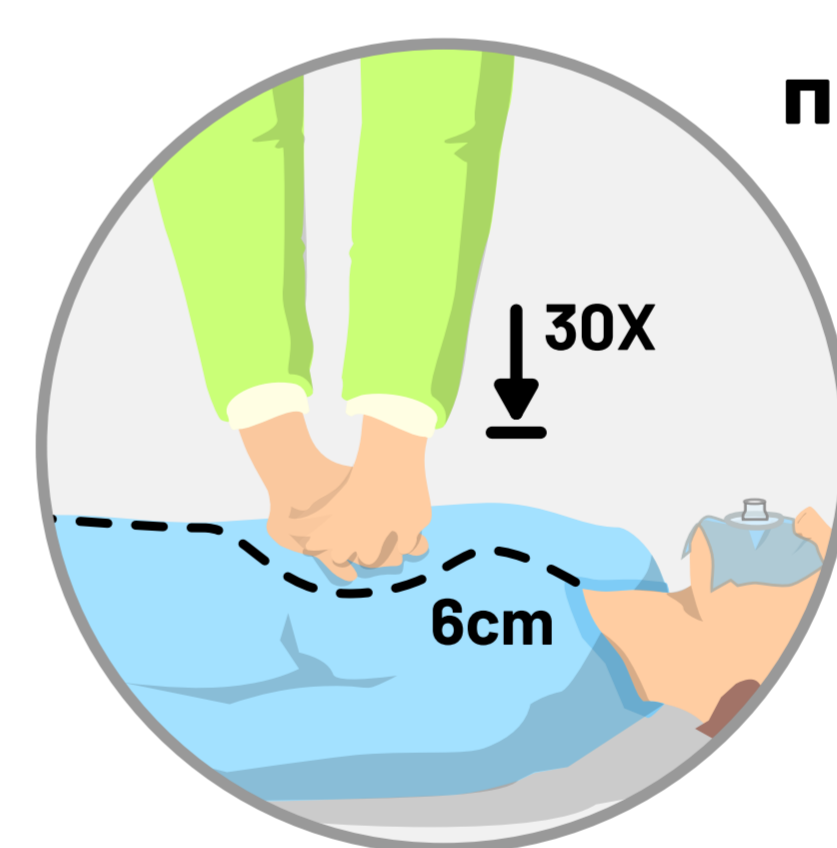


НАДАВИТЕ 30 РАЗ
НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ

повторите

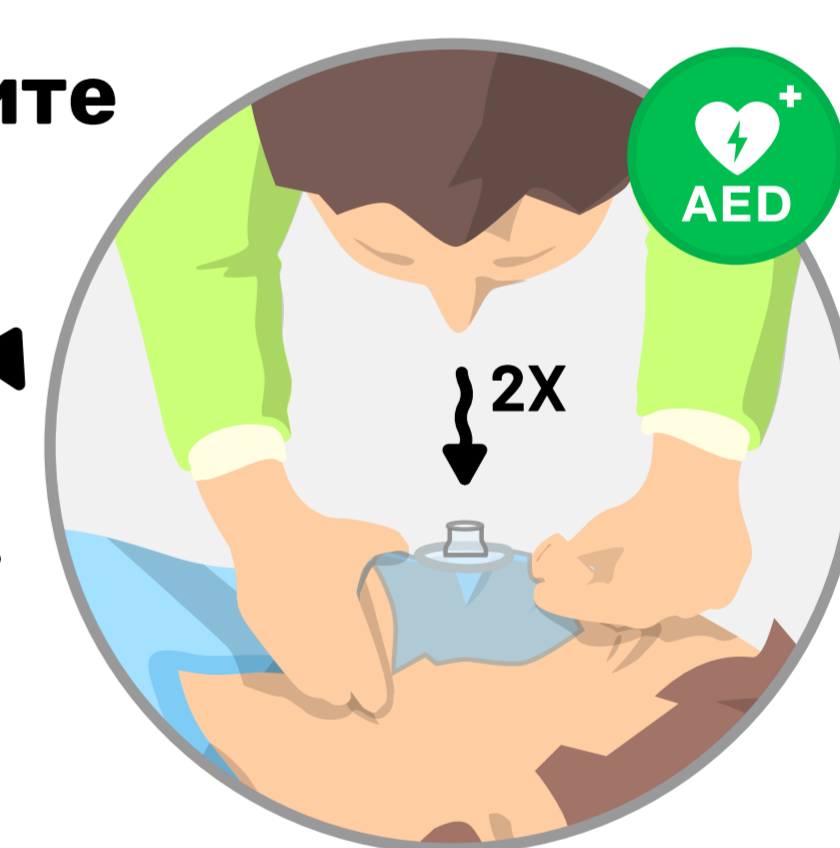

СДЕЛАЙТЕ 2
СРЕДНИХ ВЫДОХА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

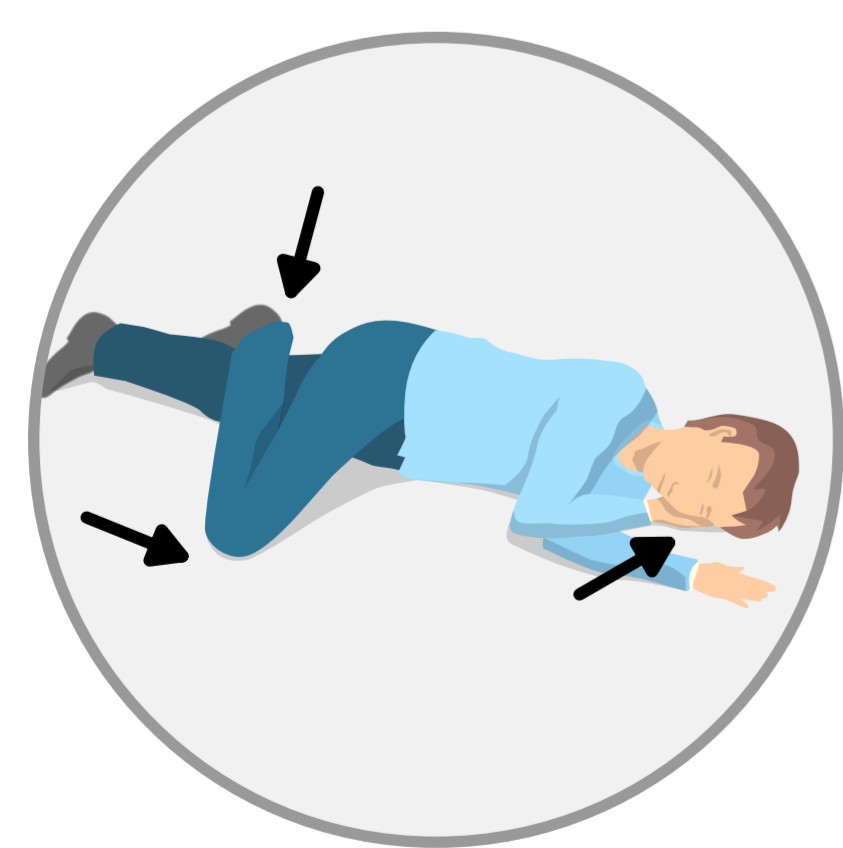

СТАБИЛИЗИРУЙТЕ
ПОСТРАДАВШЕГО




УКРОЙТЕ ПОСТРАДАВШЕГО
ТЕРМОПОВЯЗКОЙ



ПРОВЕРЬТЕ НА
НАЛИЧИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ

повторите

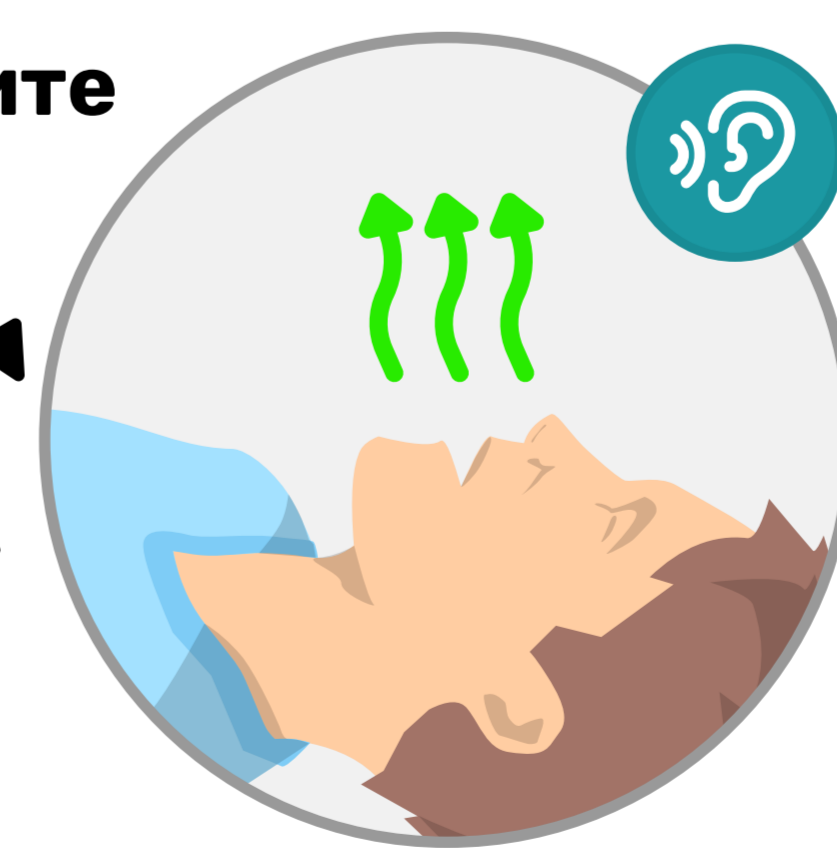

ПРОВЕРЬТЕ
ДЫХАНИЕ



ЖДИТЕ ПРИЕЗДА СКОРОЙ
СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ

НАЛОЖИТЕ ЖГУТ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ