


CARTE D'INSTRUCTIONS

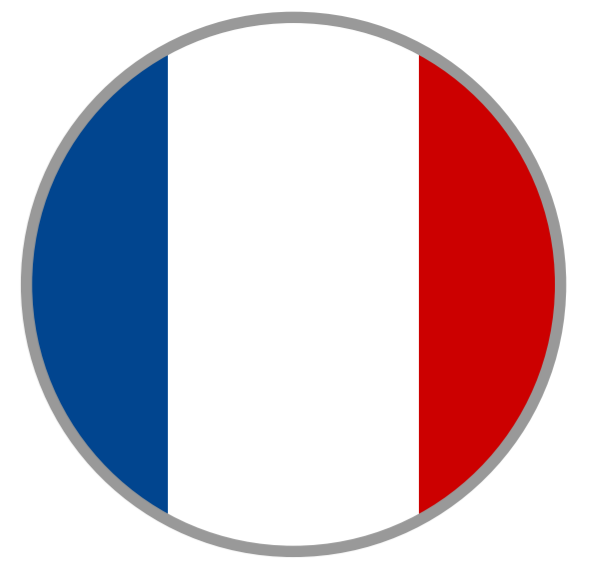

SÉCURITÉ AVANT TOUT:



OBSERVEZ LA SITUATION




VÉRIFIEZ LA VICTIME



APPELEZ LE 112
APPELEZ À L'AIDE



METTRE LE TÉLÉPHONE
EN MODE HAUT-PARLEUR

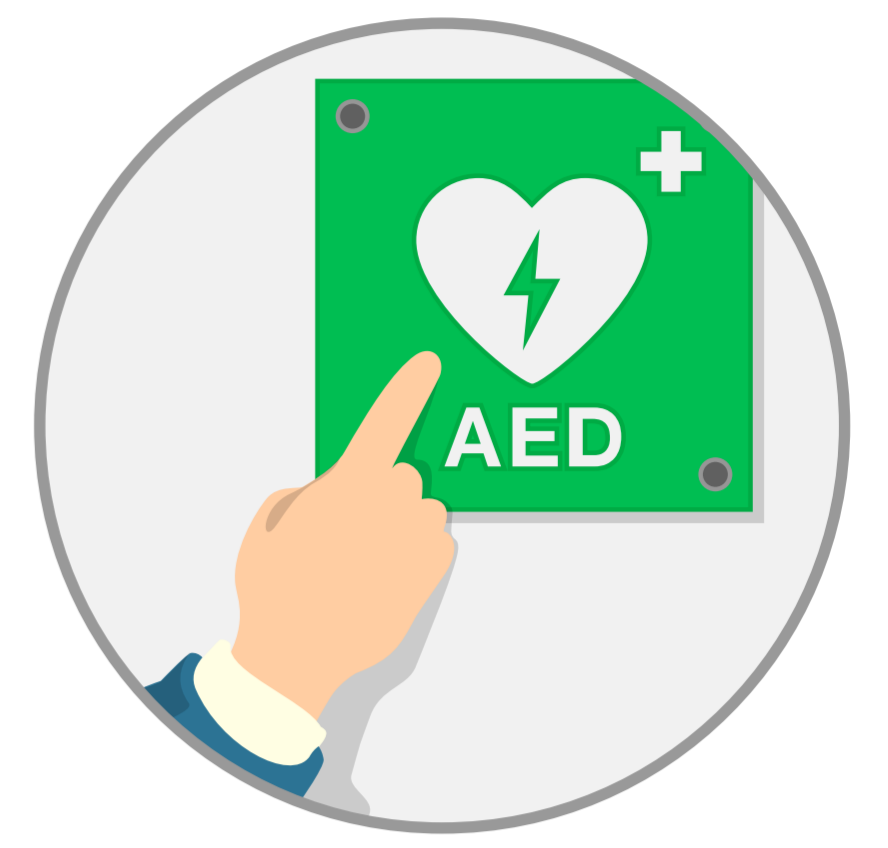

APPELEZ À L'AIDE /
POUR UN DAE

HÉMORRAGIE GRAVE:



APPUYEZ FERMEMENT
MAINTENEZ LA PRESSION




APPLIQUEZ LE BANDAGE

LE SAIGNEMENT CONTINUE?



SAIGNEMENT ARRÊTÉ?

BRAS OU JAMBE:

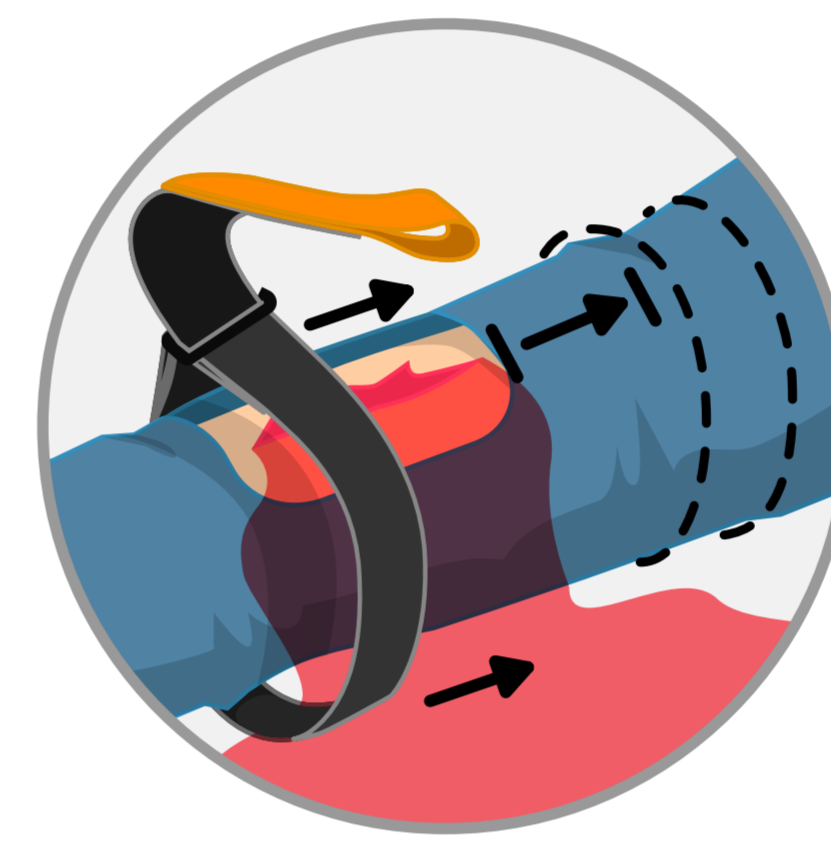

PLACEZ LE GARROT



TIREZ!
ENROULER LE GARROT

VOIES RESPIRATOIRES/RESPIRATION:



VÉRIFIEZ S'IL Y A DES
OBSTRUCTIONS




VÉRIFIEZ LA RESPIRATION

AUCUNE RESPIRATION?




RESPIRATION OK?

CIRCULATION:

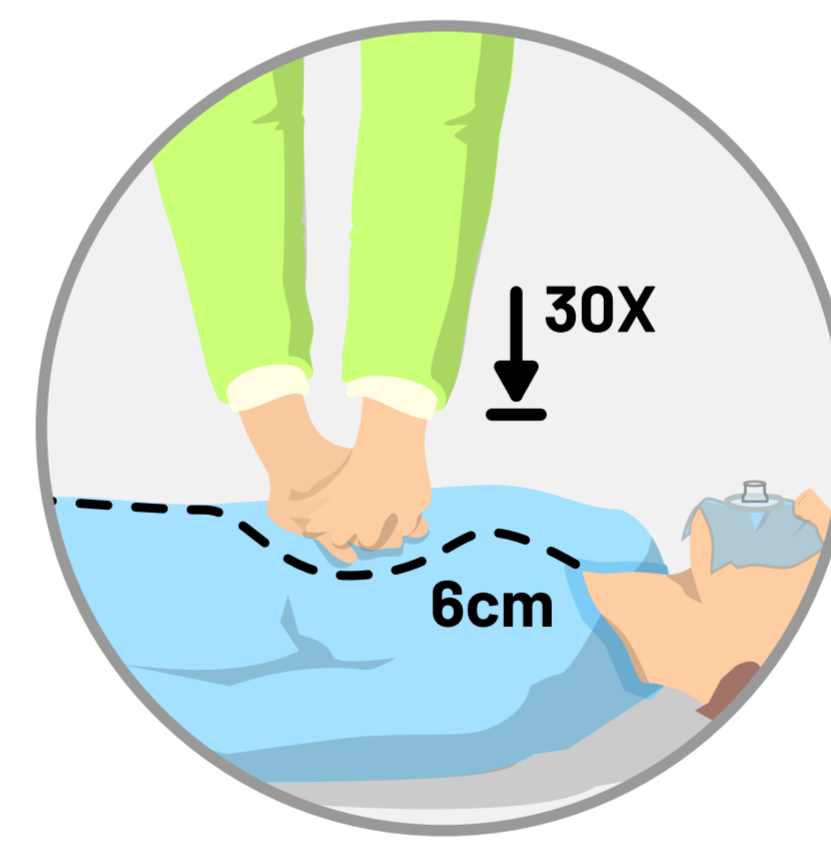


EFFECTUEZ 30
COMPRESSIONS
THORACIQUES

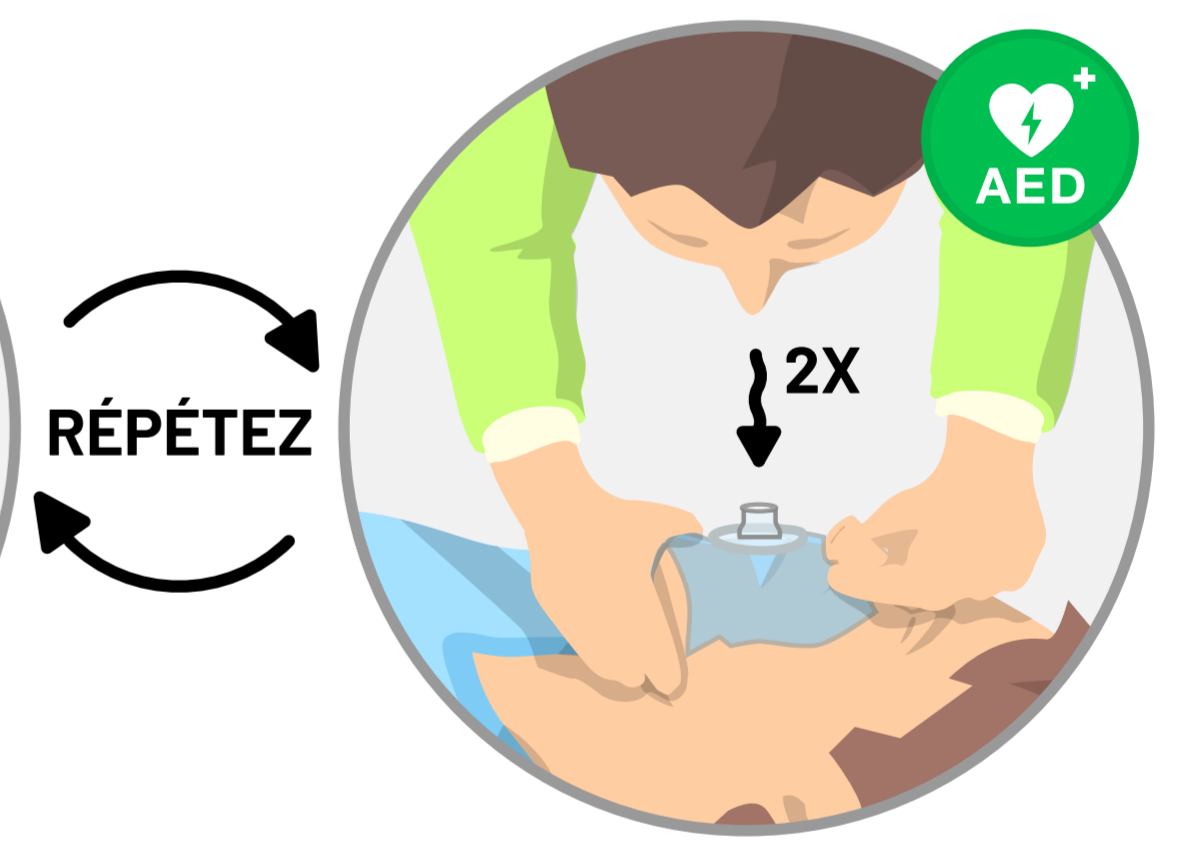

EFFECTUEZ 2
INSUFFLATIONS
D'INTENSITÉ MOYENNE

SOINS POST-TRAUMATIQUES:

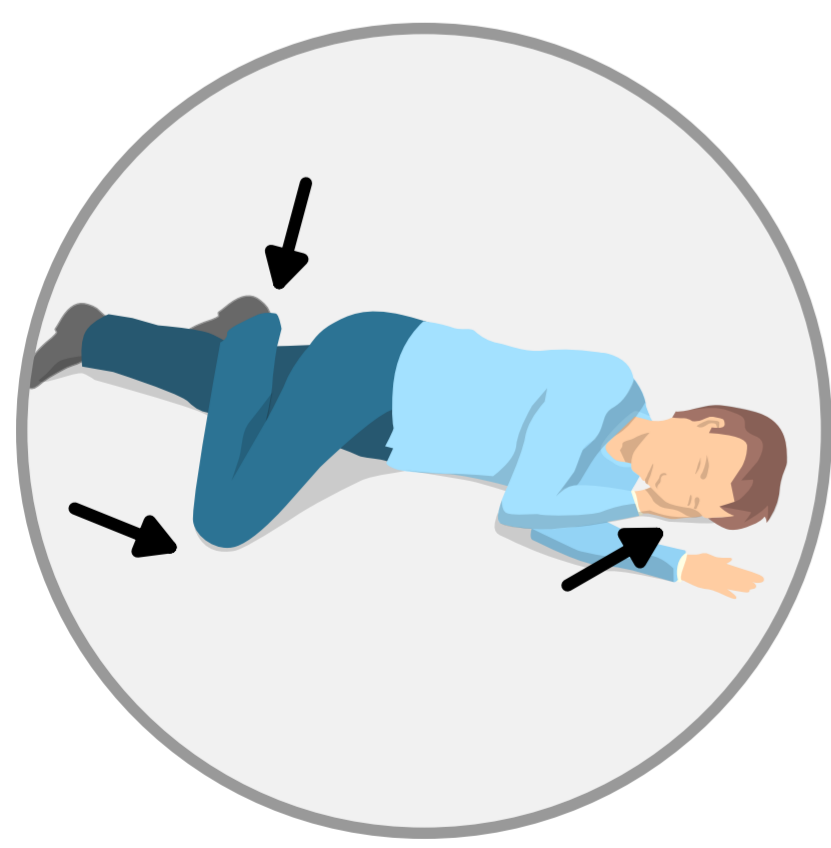


STABILISEZ LA VICTIME



ENVELOPPEZ-LA DANS
UNE COUVERTURE
DE SAUVETAGE



VÉRIFIEZ LE SAIGNEMENT
SERREZ ÉVENTUELLEMENT LE TOURNIQUET

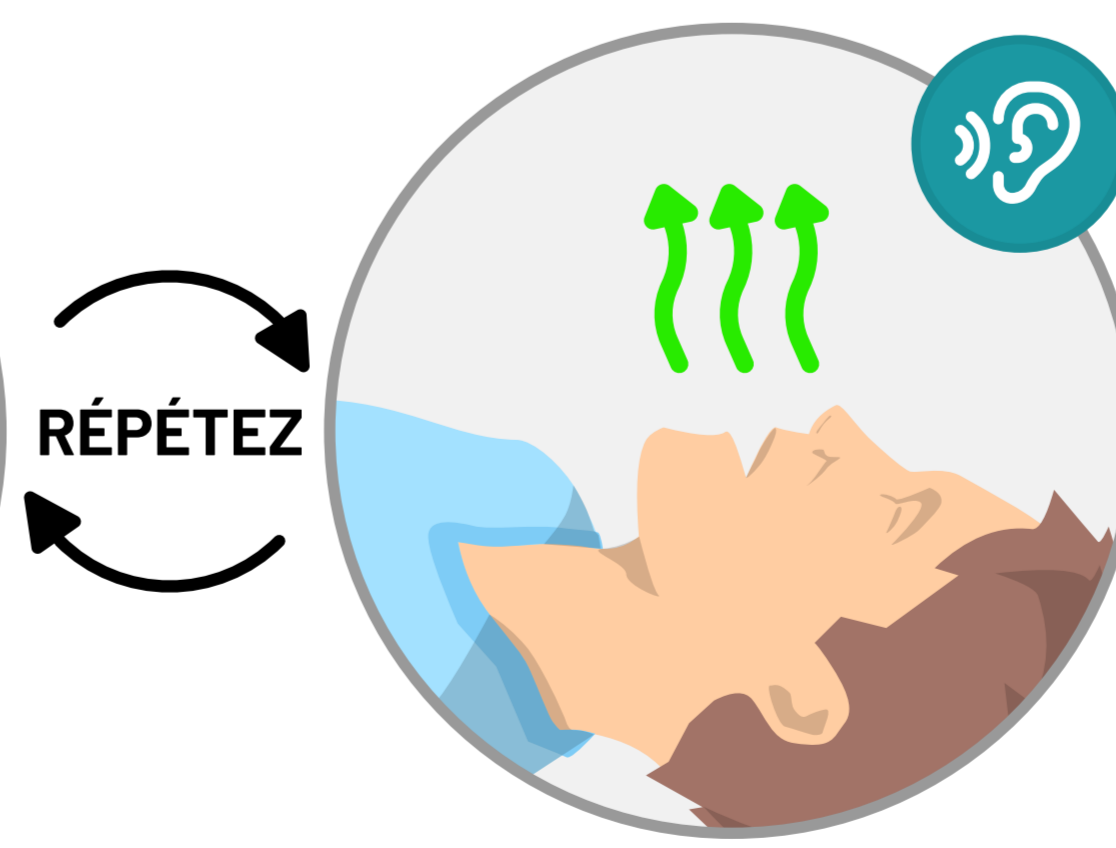

VÉRIFIEZ LA RESPIRATION



L'AIDE ARRIVE /
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS