

# INSTRUKTION KAART



## PERSÉINLECH SÉCHERHEET ÉISCHT:



OBSERVÉIERT  
D'SITUATIOUN




IWWERPRÉIFT  
D'AFFER



RUFFT DEN 112 UN /  
RUFFEN FIR HËLLEF



SETZT TELEFON  
OP SPEAKERPHONE

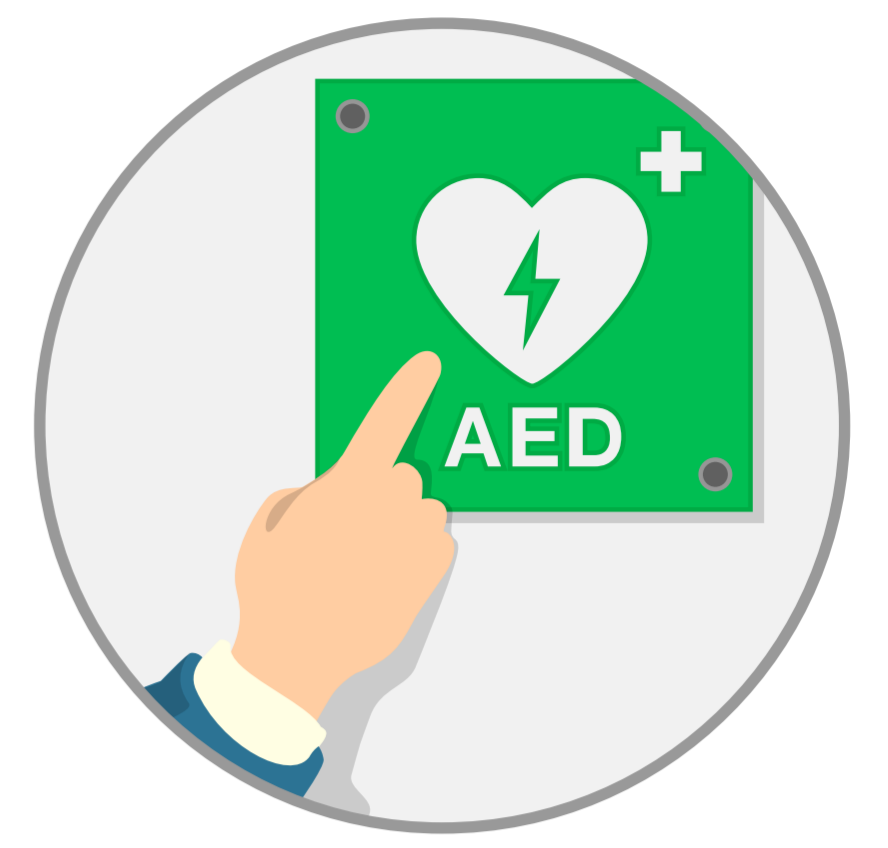

RUFFT HËLLEF /  
EN AED

## SCHWÉIER BLUTUNGEN:



DRÉCKT  
FEST

DEN DROCK BEHALEN




FËLLT  
BANDAGE

NET GESTOPPT?



GESTOPPT?

## AARM ODER BEEN:

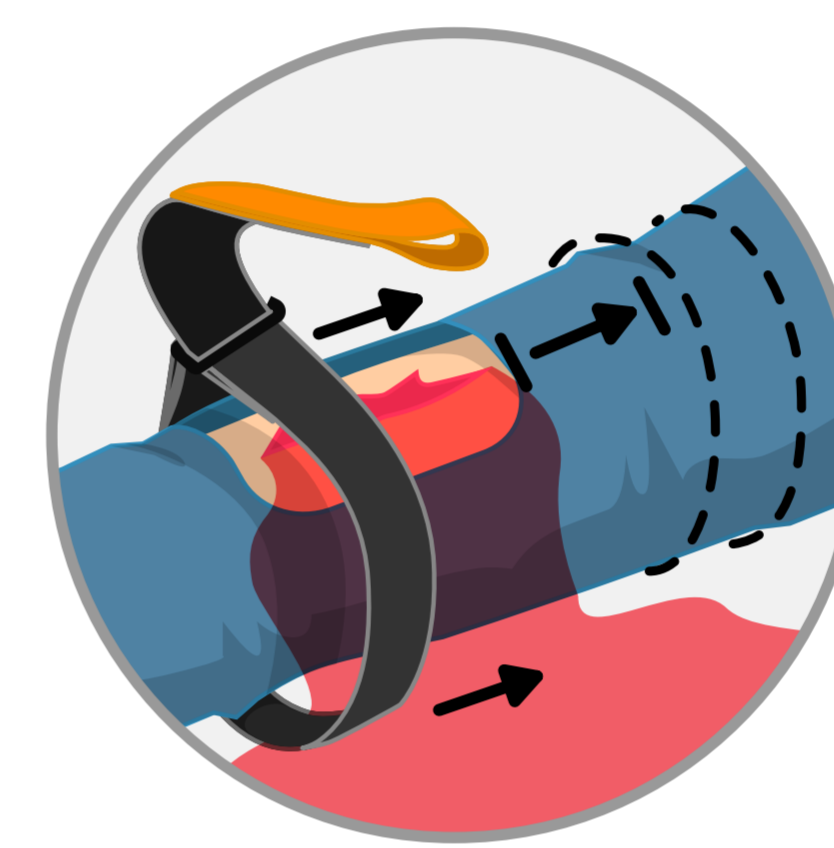

PLAZ DEN  
TOURNIQUET



PULL! WICKELT  
DEN TOURNIQUET

## AIRWAY/ATMUNG:



KONTROLLÉIERT  
OP BLOCKADEN




CHECK  
ATMUNG

KEEN OTEM?




OTEM OK?

## CIRCULATION:

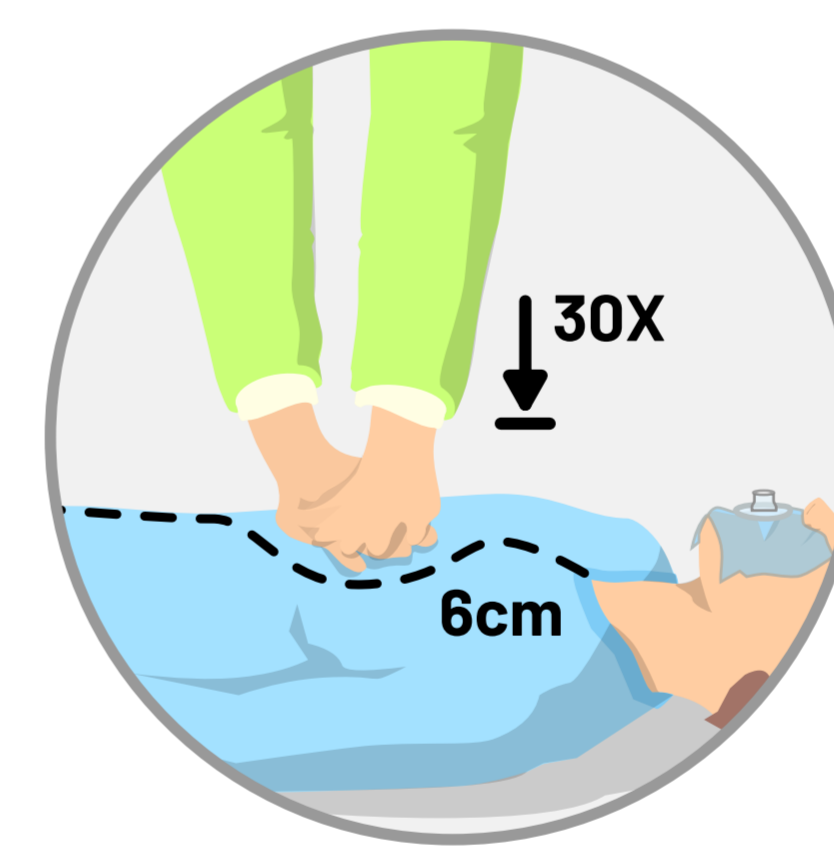


MAACHT 30  
KËSCHTKOMPRESSIOUNEN

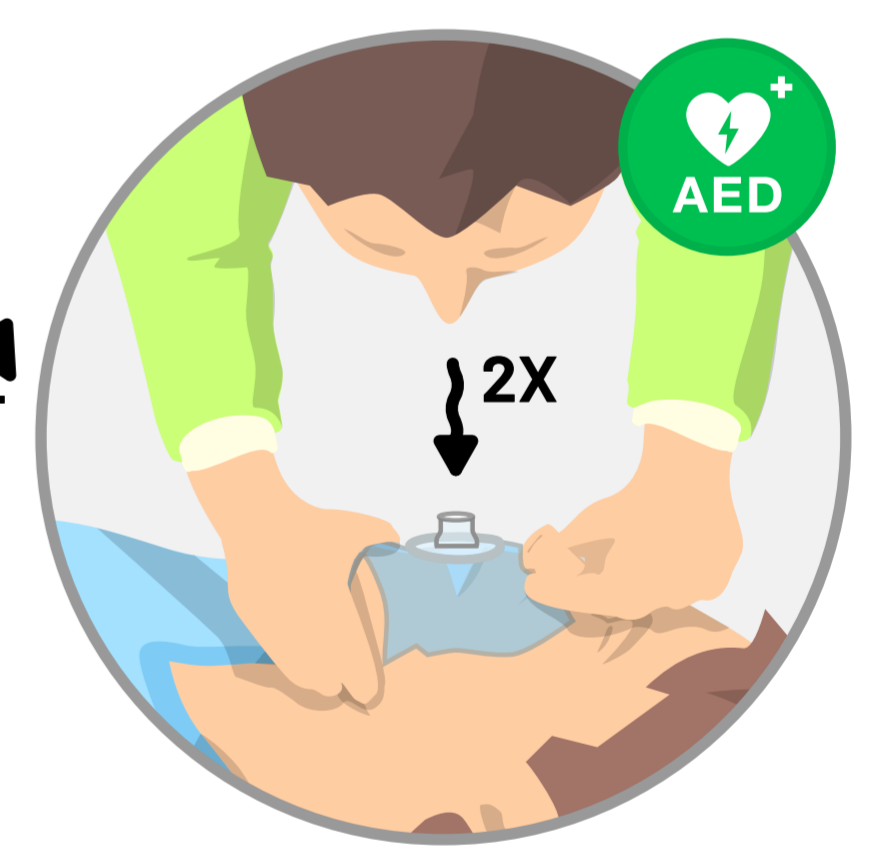

GITT 2 MEDIUM  
RETTUNGSATEM

## AFTERCARE:

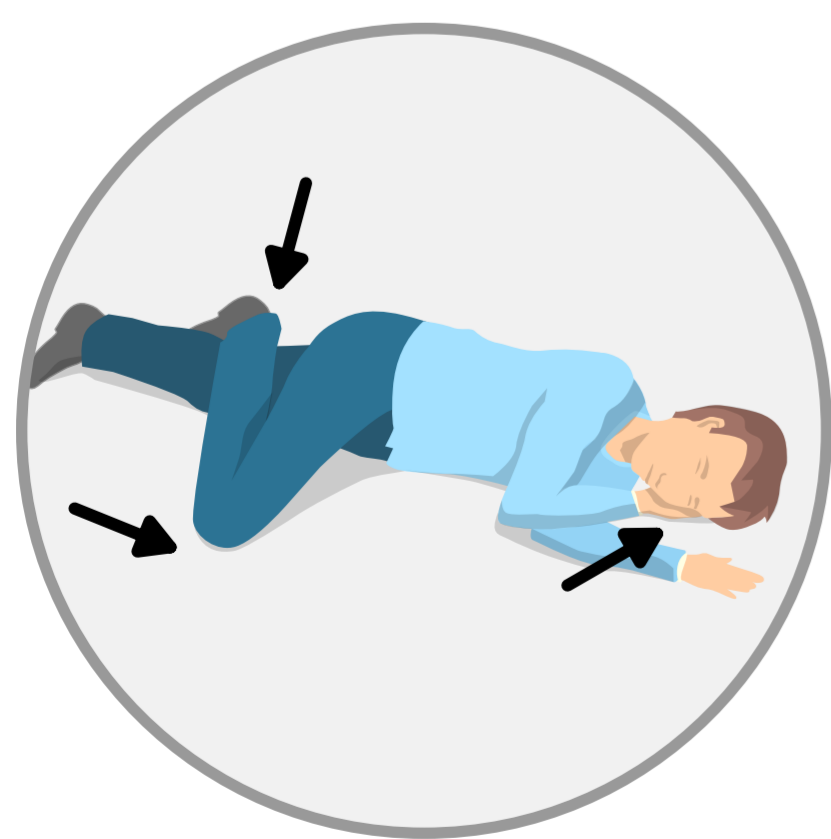

STABILISÉIERT  
D'AFFER



WICKELT HATT  
AN ENGER RETTUNGSDECKEN



KONTROLLÉIERT  
D'BLUTUNGEN

WIDDER-  
HUELEN



CHECK  
ATMUNG



HËLLEF KËNNT /  
FOLLEGT D'INSTRUKTIONE

WANN NÉIDEG, DRÉIT D'TOURNIQUET MÉI FEST