
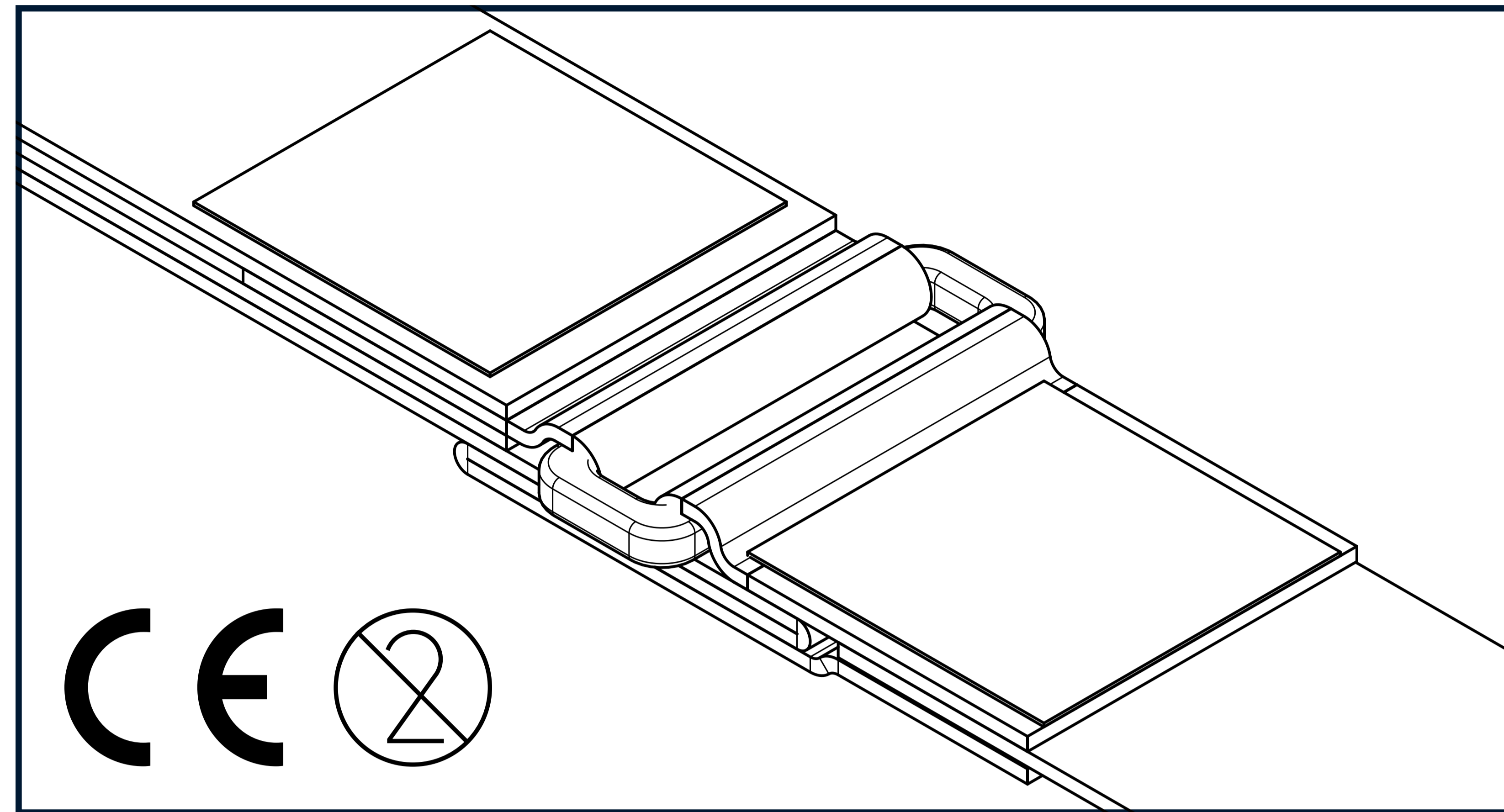


MANUAL

Torniquete First15

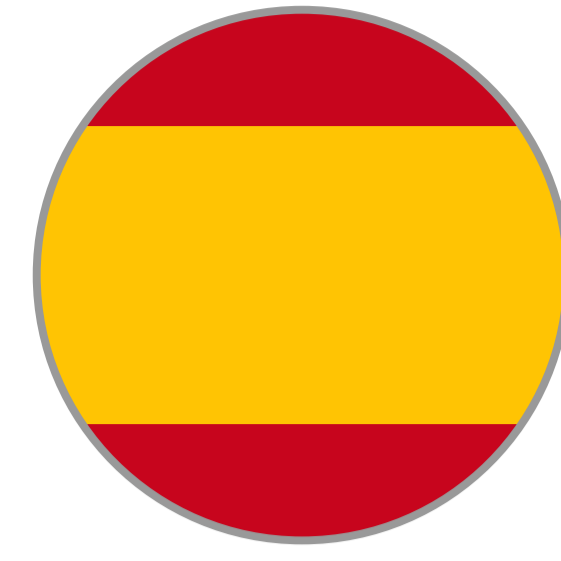

Limitación de responsabilidad

First15 B.V., sus empleados, agentes, contratistas, proveedores y distribuidores no aceptan ninguna responsabilidad por lesiones o daños que resulten de la aplicación y el uso del torniquete First15.

El usuario asume todos los riesgos de responsabilidad. El torniquete First15 solo debe utilizarse según las indicaciones de las autoridades médicas o bajo la supervisión de un médico.

Informe cualquier incidente relacionado con este medio auxiliar al fabricante y a la autoridad competente del país / Estado miembro donde se encuentra el usuario y / o paciente.


Este producto es un medio auxiliar médico de Clase 1 y puede requerir capacitación específica para su uso adecuado. Siga las directrices locales o gubernamentales sobre el uso de este medio auxiliar.

El uso de un torniquete es un último recurso y solo debe usarse en una situación potencialmente mortal y si el sangrado no se puede detener.


FIRST15

©First15 B.V. Todos los derechos reservados.
Laan van Kronenburg 14. 1183 AS, Amstelveen


Más información se puede encontrar en:
WWW.FIRST15.ONLINE

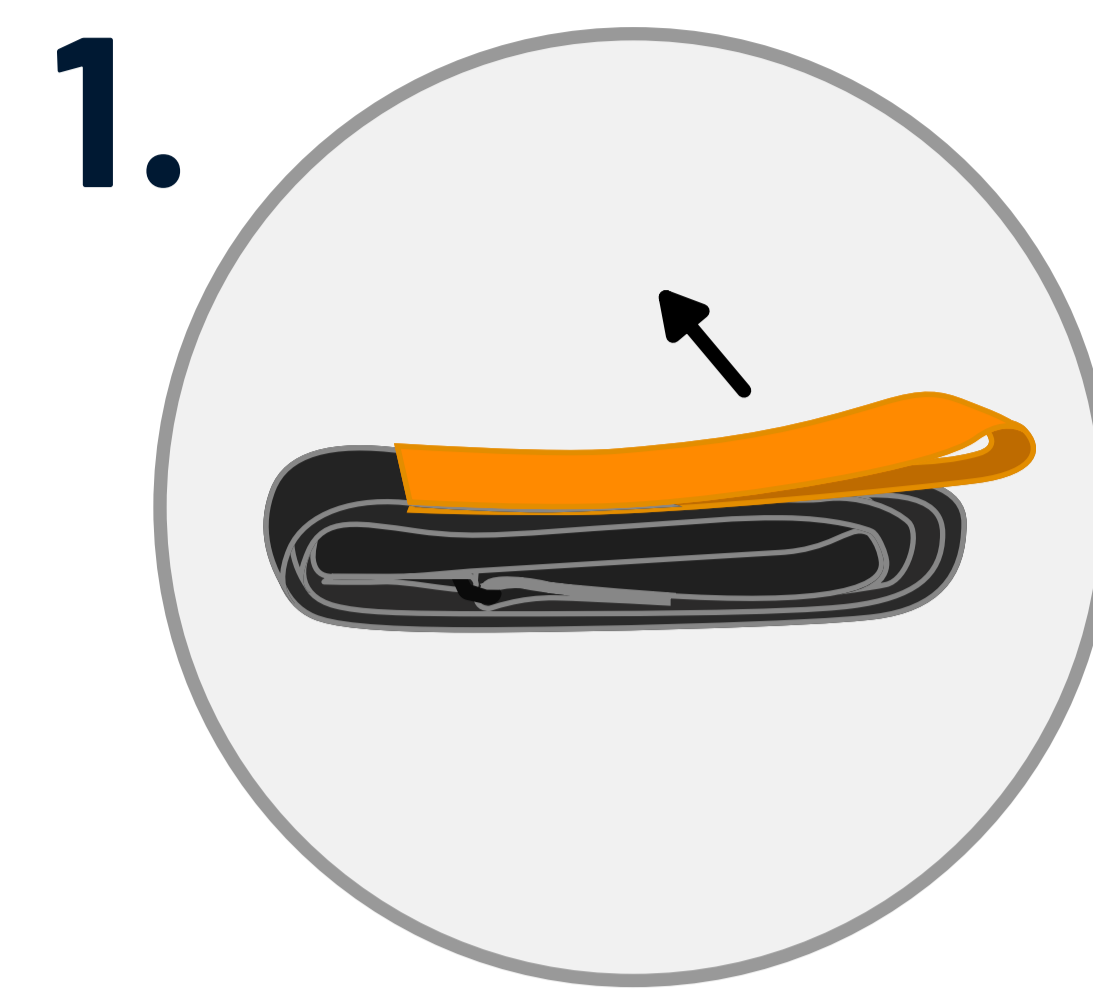

1. Abra el paquete y desenrolle el torniquete por completo.

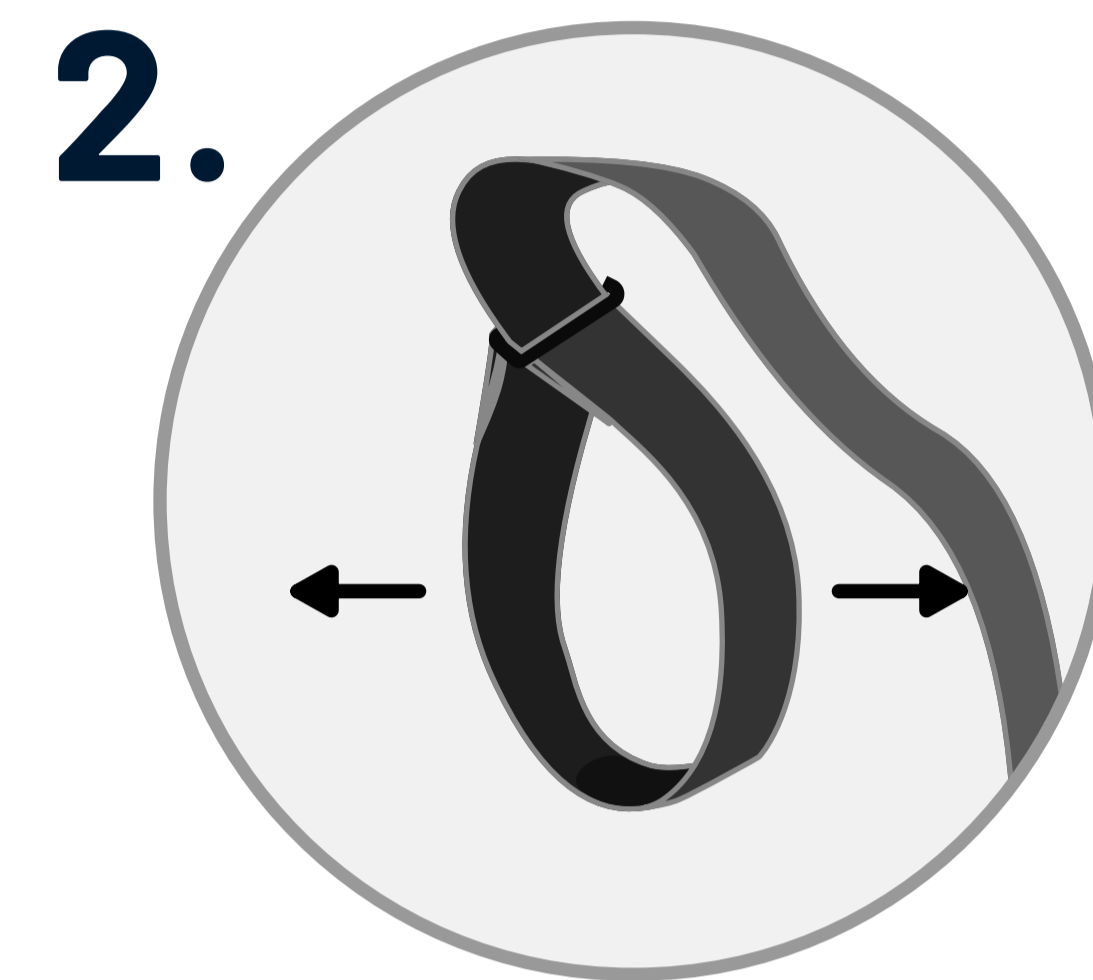

2. Agrande el nudo del torniquete para que se ajuste a la extremidad afectada.

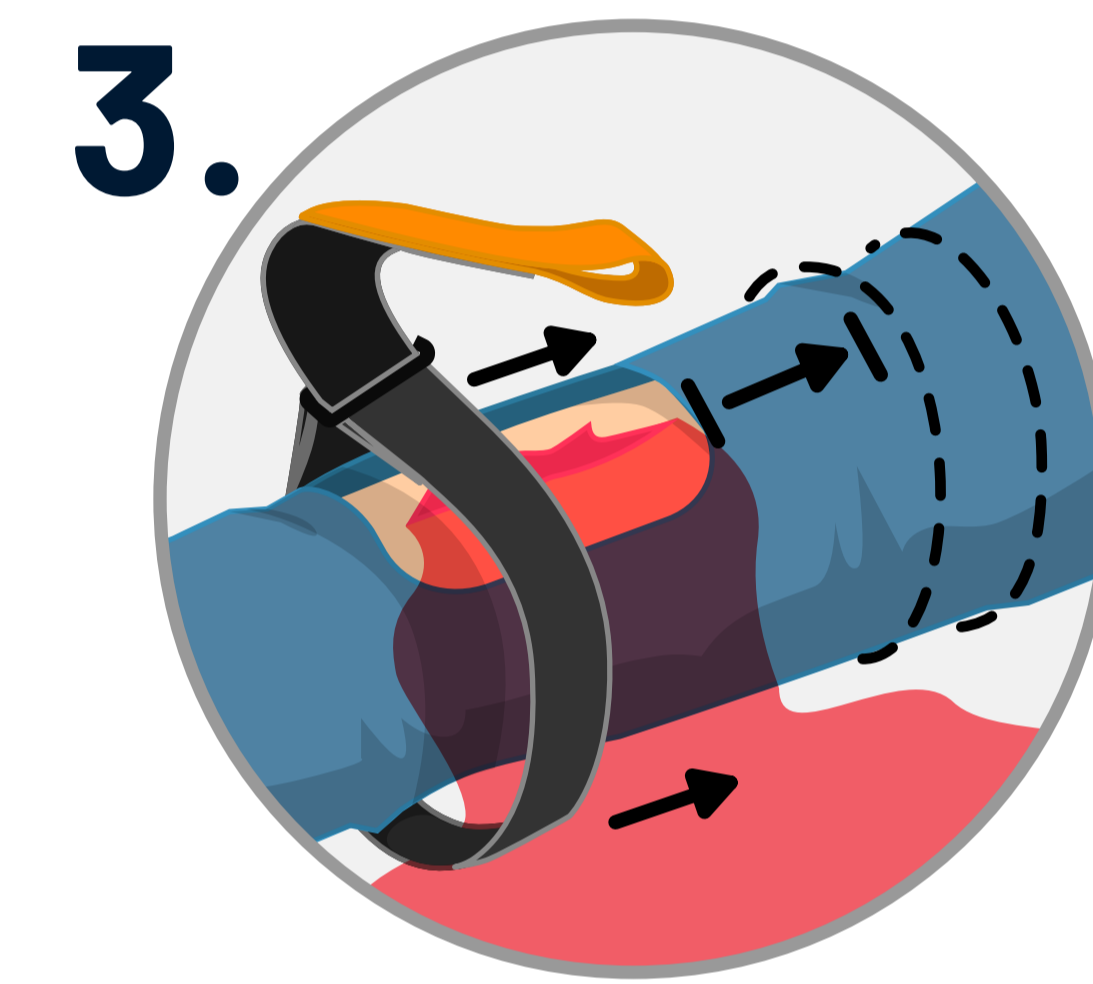



3. Deslice el torniquete sobre la extremidad afectada, por **encima** del nivel del sangrado.

3.1 Coloque el torniquete por lo menos **5 centímetros** por encima de la herida.

3.2 Aplique el torniquete en la **parte superior** del **brazo** o **muslo**.

! El torniquete solo debe aplicarse en un brazo o pierna.

x **iNo aplique** el torniquete a una articulación!

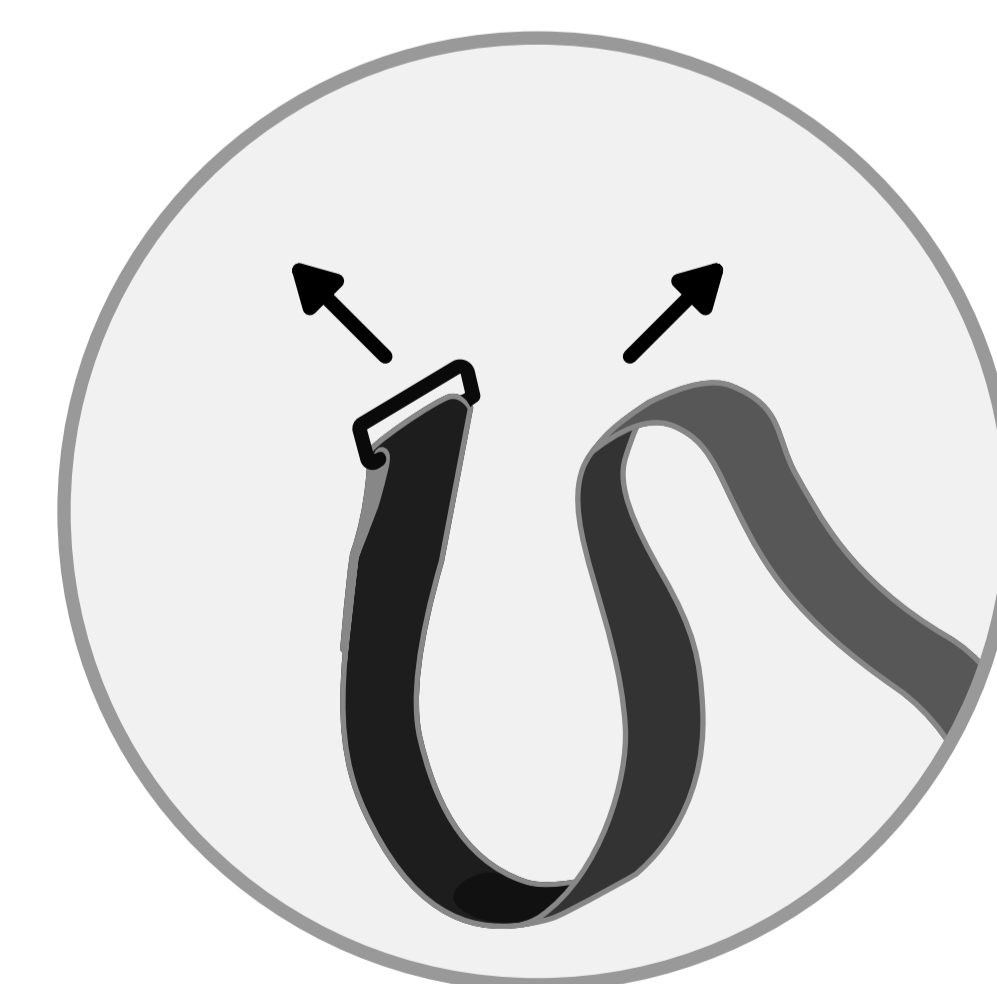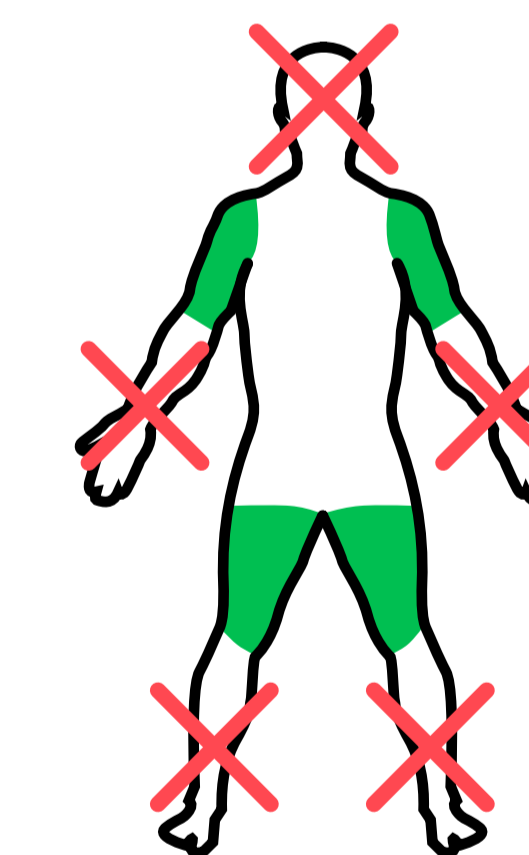

¡ATENCIÓN!

¿No es posible deslizar el nudo por la pierna o el brazo?

Afloje el torniquete por completo. Envuélvalo alrededor de la extremidad y asegúrelo colocando la punta de nuevo a través de la hebilla.




4. Tire la venda de modo que el nudo esté apretado alrededor de la extremidad.



5. Enrolle la banda alrededor de la extremidad **lo más fuerte posible** mientras mantiene la compresión continuando tirando con fuerza.

5.1 Utilice toda la longitud del torniquete.

! Verifique con cada vuelta para ver si el sangrado disminuye.

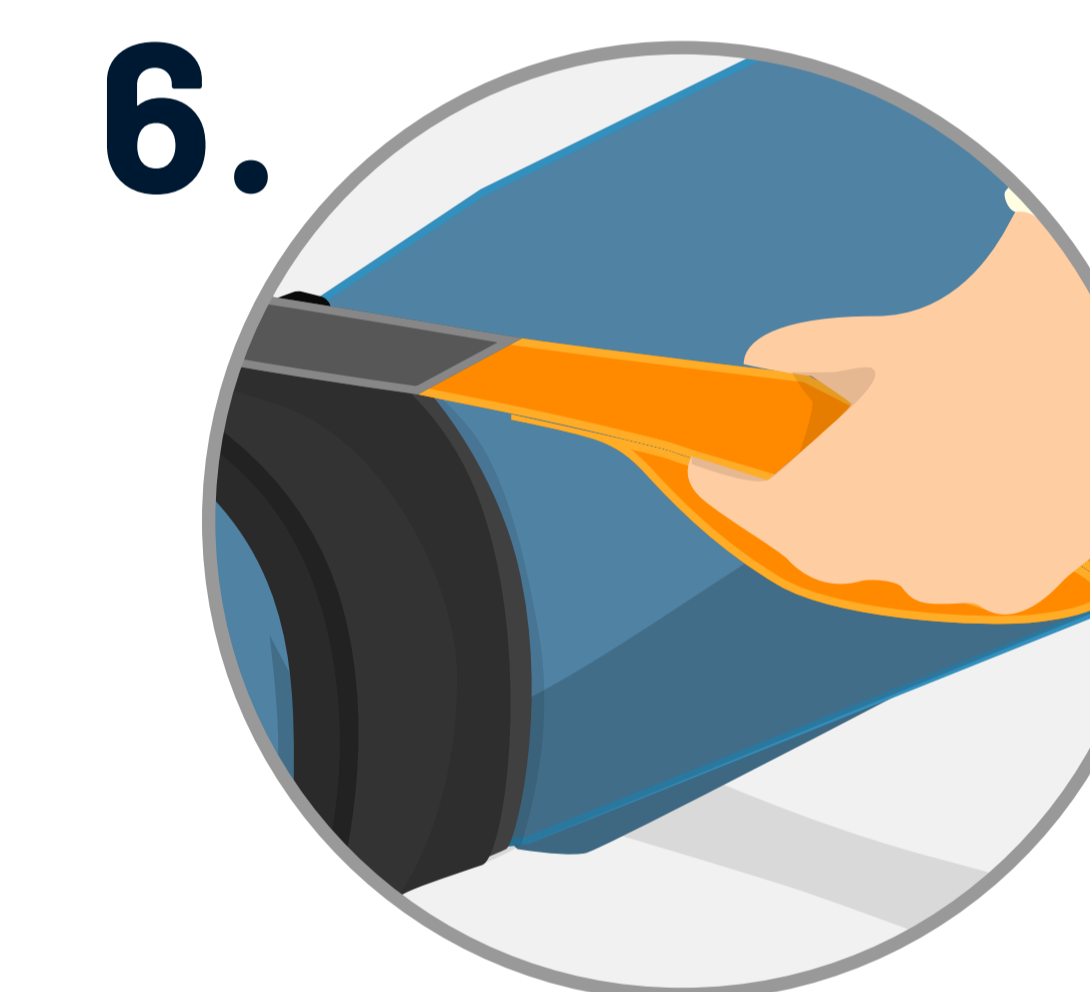

6. En el último golpe, use la manija para obtener fuerza adicional y **asegúrese** de usar el torniquete con la cinta velcro.

! El torniquete está suficientemente tirado cuando el sangrado se detiene.



7. Compruebe periódicamente si todavía hay una **cerradura completa**.

! Compruebe periódicamente si todavía hay una cerradura completa. El movimiento y los cambios en el tono muscular pueden aflojar el torniquete.

! El producto es para un solo uso. (El producto no debe usarse más de una vez).